

Communiqué interne

DESTINATAIRES: Chefs des unités de soins de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé

EXPÉDITRICES: Isabelle Jeanson, conseillère clinique DSM
Frédérique Lamoureux Pelletier, conseillère clinique DSI

DATE: Le 4 septembre 2019

OBJET: **Nouveau modèle de contention pelvienne**

Veuillez prendre note que la contention pelvienne de la compagnie Posey est maintenant discontinuée. Elle sera graduellement remplacée par la contention pelvienne « Oxyliam » fabriquée par la compagnie Excel Médical.

Bien que le modèle soit légèrement différent (couleur et tissu utilisé), l'installation est semblable et s'effectue de la même façon que la contention pelvienne de la compagnie Posey (clip de type « sac à dos»). Toutefois, la grandeur des contentions est en lien avec le tour de taille de l'usager et non en fonction de son poids. Voici donc l'échelle des grandeurs :

| Tour de taille | Grandeur de la contention | No Modèle |
|--------------------|---------------------------|-----------|
| Entre 60-85 cm | Small | 1010 |
| Entre 80-100 cm | Médium | 1020 |
| Entre 90 et 120 cm | Large | 1030 |

Vous trouverez sur Cliquez Clouzot, dans la trousse clinique « Mesures de contrôle », la [procédure installation contention Oxyliam](#). De plus, vous retrouverez sous peu une vidéo sur l'installation.

Les conseillères de la direction des soins infirmiers (DSI) sont disponibles pour vous accompagner dans ce changement au besoin.

Entretien de la contention :

Bien qu'elle soit de couleur foncée, la contention Oxyliam sera envoyée chez Blanchelle. Tout comme la contention Posey, elle devra être déposée, une fois utilisée, dans le panier d'articles à faire nettoyer (draps, jaquettes, etc.)

...2

Installation sécuritaire d'une ceinture pelvienne de type Oxyliam sur un fauteuil gériatrique

Nous tenons à vous rappeler qu'un communiqué a été envoyé en août 2017 concernant l'utilisation des ceintures pelviennes sur des fauteuils de chambre, en voici un extrait :



« Lorsqu'une contention pelvienne doit être mise à un usager, il est recommandé de ne pas utiliser de contentions pelviennes sur les fauteuils de chambre. Il est possible alors d'**utiliser des fauteuils gériatriques ou des fauteuils roulants dont les roues ne sont pas barrées et possédant des roulettes anti-bascule**. Ces fauteuils sont plus lourds, plus large et plus stables. Si toutefois l'utilisation d'un fauteuil de chambre était la seule option possible, il faut s'assurer d'une surveillance accrue de l'usager : placer à la vue du poste, augmenter la fréquence des surveillances. De plus, l'installation de la ceinture pelvienne doit être faite de façon sécuritaire selon les instructions du fabricant. Une mauvaise installation augmente le risque d'accident. »



Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec :

Mme Isabelle Jeanson au 450-668-1010 p.13831 ou

Mme Frédérique Lamoureux-Pelletier au 450-668-1010 p. 22368.