

## Manuel d'instruction de la contention pelvienne Oxyliam

### Mise en garde

La contention doit être installée uniquement sur des fauteuils gériatriques et des fauteuils roulants avec anti-bascule.

La contention doit être inspectée avant l'installation.



### Indications

Recommandée dans un contexte d'intervention planifié, chez un usager pour lequel cette mesure exceptionnelle de contrôle fait partie du plan d'intervention interdisciplinaire et qui permet d'assurer sa sécurité.

### Étapes d'installation

1. Assurez-vous que la grandeur de la contention convient à l'usager.

Grandeur	Recommandation périmètre du tour de taille
<b>Small</b>	Entre 60-85 cm
<b>Médium</b>	Entre 80-100 cm
<b>Large</b>	Entre 90-120 cm

2. Installez la ceinture pelvienne sur le fauteuil gériatrique ou sur le fauteuil roulant avec anti-bascule.
3. Déposez la ceinture de façon à ce que le tissu gris se retrouve directement sur le fauteuil et que le tissu noir soit visible.
4. Passez les 2 sangles derrière.
5. Demandez à l'usager de s'asseoir avec le bas du dos bien appuyé dans le fauteuil.
6. Levez les jambes de l'usager pour amener les sangles au centre.
7. Positionnez la bande abdominale à la bonne hauteur pour l'usager (abdomen).
8. Bouclez les boucles de la ceinture.
9. Ajustez la ceinture en utilisant les attaches prévues.

*\*\*Ne pas utiliser de l'eau de javel ainsi qu'un fer pour le nettoyage\*\**